

Anaftin[®] burnos skalavimo skystis

„Anaftin“[®] burnos skalavimo skystis padeda kontroliuoti mažų burnos pakenkimų sukeliamą skausmą, pavyzdžiui, atsirandantį išsivysčius aftiniam stomatitui, aftinėms opoms, taip pat mažiems ortodontinių plokštelių ir netinkamai pritaikytų protezų sukeltiems pakenkimams. Skystis taip pat tinka išplitusiu aftinių opų atvejais.

Kaip veikia?

„Anaftin“[®] burnos skalavimo skysčio sudėtyje yra polivinilo piroolidono (PVP) ir hialurono rūgšties, sudarančių apsauginę plėvelę. Ji prilimpa prie burnos ertmės ir pažeistoms vietoms sudaro mechaninę užtvarą, taip palengvindama dėl nervų galūnių dirginimo atsirandantį skausmą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis ir alavijai (*Aloe vera*) paspartina natūralų pakenktų audinių gijimą.

Vartojimo nurodymai

Pripildykite pakuotėje esantį matavimo indą iki 10 ml tūrio žymos. Skalaukite burną mažiausiai 1 minutę, tada skystį išspjaukite. Vartokite 3-4 kartus per dieną arba tiek, kiek reikia. Kad pasiektumėte geriausią rezultatą, išskalavę mažiausiai 1 valandą nevalgykite ir negerkite. Netyčia nurijus jokių papildomų priemonių nereikia.

Sudėtyje yra:

vandens, polivinilo piroolidono (PVP), maltodekstrino, propeno glikolio, tikrojo alavijo (*Aloe barbadensis*), hidroksietilceliuliozės, kalio sorbato, natrio benzoato, PEG-40 hidrinto ricinos aliejaus, dinatrio EDTA, benzalkonio chlorido, natrio hialuronato, kvapiųjų medžiagų, natrio sacharino, dikalio glicirizato.

Įspėjimai

„Anaftin“[®] burnos skalavimo skysčio negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai preparato sudėtyje esančiai medžiagai. Jei esate nėščia, prieš vartodama preparato, pasitarkite su gydytoju. Jei jus dažnai vargina burnos opos, rekomenduojama kreiptis medicininės pagalbos.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nevertokite, jei baigėsi galiojimo laikas arba jei buteliukas yra pažeistas ar nesandarus. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikykite kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. Neužšaldykite.

Turiny

120 ml

Gamintojas:

„Sinclair Pharma Srl“,
 Viale Restelli 5,
 20124 Milan, Italija

 0477

Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG
 (MENARINI GROUP),
 Glienicker Weg 125,
 12489 Berlynas, Vokietija

Peržiūrėta 2014 m. spalio mėn.