



Vartojimo nurodymai

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Anaftin[®] gelis

„Anaftin“[®] gelis padeda kontroliuoti mažų burnos pakenkimų sukeltą skausmą, pavyzdžiui, atsirandantį išsivysčius aftiniam stomatitui, aftinėms opoms, taip pat mažiems ortodontinių plokštelių ir netinkamai pritaikytų protezų sukeltiems pakenkimams. Gelis taip pat tinka išplitusių aftinių opų atvejais.

Kaip veikia?

„Anaftin“[®] gelio sudėtyje yra polivinilo pirolidono (PVP) ir hialurono rūgšties, sudarančių apsauginę plėvelę. Ji prilimpa prie burnos ertmės ir pažeistoms vietoms sudaro mechaninę užtvarką, taip palengvindama dėl nervų galūnių dirginimo atsirandantį skausmą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis ir alavijai (*Aloe vera*) paspartina natūralų pakenktų audinių gijimą.

Vartojimo nurodymai

Vieną ar du lašus gelio užtepkite, padengdami visą burnos opą ar pakenktą vietą. Žiūrėkite, kad aplikatorius tiesiogiai neprisiliestų prie pakenktos vietos. Mažiausiai 2 minutes pažeistos vietos nelieskite liežuviu, leiskite susidaryti apsauginei plėvelei. Kiekvieną kartą panaudoję užsukite kamštelį. Kad pasiektumėte geriausią rezultatą, užteptę priemonę mažiausiai 1 valandą nevalgykite ir negerkite.

Vartokite 3-4 kartus per dieną arba dažniau, jei reikia.

Sudėtyje yra:

vandens, polivinilo pirolidono (PVP), malto-dekstrino, propeno glikolio, PEG-40 hidrinto ricinos aliejaus, ksantano dervos, kalio

sorbato, natrio benzoato, natrio hialuronato, kvapiųjų medžiagų, benzalkonio chlorido, dinatrio EDTA, natrio sacharino, dikalio gli-cirizato, tikrojo alavijo (*Aloe barbadensis*).

Įspėjimai

Kad neužsiterštų aplikatorius ir gelis, vieną „Anaftin“[®] gelio tūbelę turi vartoti tik vienas pacientas. „Anaftin“[®] gelio negalima naudoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai preparato sudėtyje esančiai medžiagai. Jei esate nėščia, prieš vartodama priemonę, pasitarkite su gydytoju. Jei jus dažnai vargina burnos opos, rekomenduojama kreiptis medicininės pagalbos.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nevartokite, jei baigėsi galiojimo laikas arba jei tūbelė yra pažeista ar nesandari. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikykite kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. Ne-užšaldykite.

Turinys

8 ml

Gamintojas:

„Alliance Pharma Srl“,
Viale Restelli 5,
20124 Milanas, Italija

CE 0477

Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlynas, Vokietija

Peržiūrėta 2016 m. rugsėjo mėn.

LT / V109027/01



BERLIN-CHEMIE AG

9,5 pt

Leaflet

Product:	Anaftin [®] Gel		
Product No.:	V109027/01		
Language:	Lithuanian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. Pantone 648		
Date:	14.10.16	Melchert	BC 16-3014

Re-proofing

Ready for printing

Signature _____