

Vartojimo nurodymai

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams yra lipnus biologinis burnos gleivinės gelis. Jis greitai suformuoja nematomą plėvelę, kuri apsaugo danteną nuo diskomforto ir skausmo. Natūralios sudėtyje esančios medžiagos pažeistose dantenų vietose padeda malšinti skausmą ir paraudimą.

Pridedamas aplikatorius su silikoniniais šereliais švelniai masažuoja danteną, todėl palengvėja su dantukų kalimusi susijęs diskomfortas ir simptomai.

– GAMINIO PAVEIKSLĖLIS –

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams sudėtyje nėra vietiskai veikiančių anestetikų, vaistų, alkoholio ar cukraus.

Užteptas Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams nesukelia deginimo pojūčio ir yra malonaus bananų skonio.

Vartojimo nurodymai

Ant pažeistos vietos užtepkite pakankamai gelio ir aplikatoriumi švelniai masažuokite danteną.

Gelį pageidautina tepti kūdikiui pavalgį ir prieš užmiegant, kad geriau susidarytų plėvelė ir ilgesnį laiką būtų malšinamas skausmas. Vartokite taip dažnai, kiek reikia. Kiekvieną kartą patepę užsukite kamštelį. Pašalinkite visus gelio likučius, kurie galėtų kitą kartą trukdyti tinkamai naudoti gelį.

Sudėtis

Vanduo, polivinilpirolidonas (PVP), maltodekstrinas, propileno glikolis, PEG-40 hidrintas ricinų aliejus, tikrasis alavijas (*Aloe barbadensis*), ksantano derva, kvapioji medžiaga, kalio sorbatas, natrio benzoatas, dinatrio EDTA, natrio hialuronatas, ksilitolis, cetilpiridinio chloridas, gliciretino rūgštis, daržinis krokas (*Crocus sativus*).

Įspėjimai

Kad būtų išvengta aplikatoriaus ir gelio kryžminio užteršimo, vieną Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams tūbelę gali naudoti tik vienas pacientas. Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai. Jei esate nėščia, prieš vartodama priemonę pasitarkite su gydytoju.

Atsargumo priemonės ir perspėjimai

DĖMESIO!

Gelį turėtų užtepti tik suaugusieji

Ši medicinos priemonė nėra žaislas! NIEKADA jo neduokite vaikui į rankas. Užspringimo pavojus!

Prieš naudodami medicinos priemonę apžiūrėkite, ar nėra nusidėvėjimo požymių. Užtepdami gelį būkite atidūs, kad neatsiskirtų aplikatoriaus galvutės detalės. Jei taip atsitiktų, daugiau jo nenaudokite.


Atsiskyrusios dalies nemėginkite prijungti.

Pasibaigus geliui priemonės daugiau nenaudokite.

Nevartokite pasibaigus galiojimo laikui arba jei tūbelė yra pažeista ar nesandari. Laikykite kambario temperatūros sąlygomis, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių.

Neužšaldykite.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

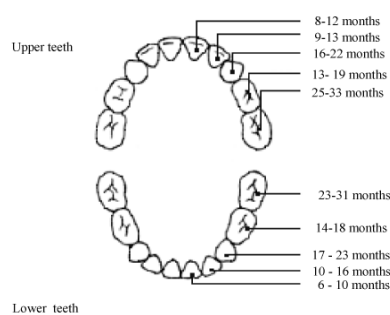

Viršutiniai dantukai	8–12 mėnesiai 9–13 mėnesiai 16–22 mėnesiai 13–19 mėnesiai 25–33 mėnesiai
Apatiniai dantukai	23–31 mėnesiai 14–18 mėnesiai 17–23 mėnesiai 10–16 mėnesiai 6–10 mėnesiai

Talpa

10 ml

Gamintojas: Alliance Pharma Srl., Viale Restelli 5, 20124 Milan, Italija **CE 0373**

Platintojas: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Vokietija

Peržiūrėta 2016 m. rugsėjį

BC logotipas