

## Vartojimo nurodymai

# Anaftin<sup>®</sup> purškalas

„Anaftin“<sup>®</sup> purškalas padeda kontroliuoti mažų burnos pakenkimų sukeltą skausmą, pavyzdžiui, atsirandantį išsivysčius aftriniam stomatitui, aftrinams opoms, taip pat mažiems ortodontinių plokštelių ir netinkamai pritaikytų protezų sukeltiems pakenkimams. Purškalas taip pat tinka išplitusių aftinių opų atvejais.

## Kaip veikia?

„Anaftin“<sup>®</sup> purškalo sudėtyje yra polivinilo piroolidono (PVP) ir hialurono rūgšties, sudarančių apsauginę plėvelę. Ji prilimpa prie burnos ertmės ir pažeistoms vietoms sudaro veiksmingą užtvaramą, taip palengvindama dėl nervų galūnių dirginimo atsirandantį skausmą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis ir alavijai (*Aloe vera*) paspartina natūralų pakenktų audinių gijimą.

## Vartojimo nurodymai

Priemonę vartodami pirmą kartą, nuimkite dangtelį ir uždėkite purkštuką. Purkštuką nukreipkite į burnoje esančią pažeistą vietą ir tris kartus arba tiek, kiek reikia, purškite priemonę, kad padengtumėte pažeistą plotą. Kad pasiektumėte geriausią rezultatą, pasipurškę priemonės mažiausiai 1 valandą nevalgykite ir negerkite. Purkštukas suteikia galimybę priemone padengti burnos pažeidimus ir užtikrinti stipriausią poveikį.

Purškite 3-4 kartus per dieną arba dažniau, jei reikia.

## Sudėtyje yra:

*vandens*, propeno glikolio, polivinilo piroolidono (PVP), maltodekstrino, tikrojo alavijo (*Aloe barbadensis*), kalio sorbato, natrio

benzoato, PEG-40 hidrinto ricinos aliejaus, dinatrio EDTA, benzalkonio chlorido, natrio hialuronato, kvapiųjų medžiagų, natrio sacharino, dikalio glicerizato.

## Įspėjimai

„Anaftin“<sup>®</sup> purškalo negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai priemonei sudėtyje esančiai medžiagai. Jei esate nėščia, prieš vartodama priemonę, pasitarkite su gydytoju. Jei jus dažnai vargina burnos opos, rekomenduojama kreiptis medicininės pagalbos.

## Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nevartokite, jei baigėsi galiojimo laikas arba jei atrodo, kad buteliukas pažeistas ar nesandarus. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikykite kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. Neužšaldykite. Stenkitės, kad priemonės nepatektų į akis.

## Turinys

15 ml

## Gamintojas:

„Alliance Pharma Srl“,  
Viale Restelli 5,  
20124 Milanas, Italija



## Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP),  
Glienicke Weg 125,  
12489 Berlynas, Vokietija

## Peržiūrėta 2016 m. rugsėjo mėn.

LT / V109039/01

Product:	Anaftin <sup>®</sup> Spray		
Product No.:	V109039/01		
Language:	Lithuanian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. Pantone 648		
Date:	14.10.16	Melchert	BC 16-3021

Re-proofing

Ready for printing

Signature \_\_\_\_\_